


LeadFIX®

Resorbovatelné piny z polyaktidu pro fixaci membrán


1. UMÍSTĚNÍ PINŮ DO ZÁSOBNÍKU

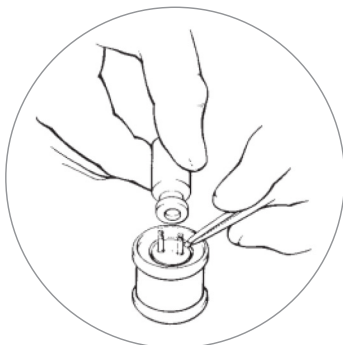

Do dvou otvorů uprostřed zásobníku na piny vložte vrtáky.


Klepněte skleněnou lahvičkou s piny o podložku, aby se uvolnily piny, které event. uvízly v průběhu přepravy u silikonového uzávěru. V každé lahvičce jsou 2 ks pinů. Otevřete sterilní lahvičku a piny nasypete na zásobník. Sterilní pinzetou umístěte piny do drážky po obvodu zásobníku.

2. NABRÁNÍ PINU ZAVADĚČEM

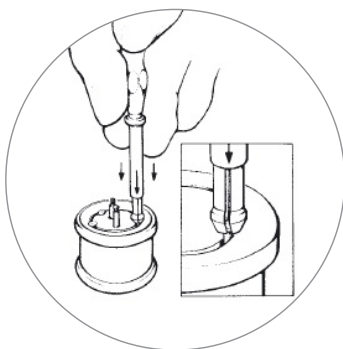

Pro upevnění pinu do zavaděče držte zavaděč ve svislé poloze tak, abyste mohli hlavu zavaděče umístit nad hlavičku pinu. Zavaděč přitlačte na hlavičku pinu, dokud nezapadne do kleštiny. Pin je nyní bezpečně uchycen v zavaděči a je připraven k zavedení.

3. PERFORACE BUKÁLNÍ KORTIKY

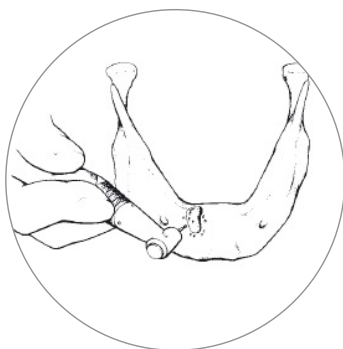

Pro tvrdou kost se doporučuje použít vrták průměru 0,9 mm. Pro měkkou kost použijte vrták průměru 0,8 mm.

Vyjměte vrták LeadFIX® ze zásobníku a upevněte jej v chirurgickém kolénku. **Perforaci buklální kosti v požadovaných místech provádějte vždy kolmo ke kosti.** V závislosti na denzitě kosti lze jeden vrták použít pro 5–10 pinů.

4. MĚKKÉ MEMBRÁNY: POUŽITÍ ZUBNÍ SONDY



Při použití měkké snadno perforovatelné membrány lze použít zubní sondu LeadFIX®. Na požadovaných místech podél okraje defektu, kde má být membrána aplikována, vytvořte sondou otvory pro vložení pinů. Membránu vytvarujte a upravte podle potřeby. V místech předpřipravených otvorů propíchněte membránu zubní sondou LeadFIX® a zaveďte piny.

5. TVRDÉ MEMBRÁNY: POUŽITÍ VRTÁKU A ŠABLONY



V případě, že je membrána příliš tvrdá k propíchnutí zubní sondou LeadFIX®, je možné ji perforovat vrtákem LeadFIX®. Vytvarujte a upravte membránu dle potřeby. Přiložte šablonu na zavádění a vrtání na požadované místo a vrtákem vyvrtejte otvor pro pin. Ponechte šablonu ve stejné poloze a zaveďte pin.

6. ZAVEDENÍ PINŮ PRO FIXACI MEMBRÁNY

**Důležité upozornění:**

Piny LeadFIX® musí být zaváděné axiálně k předvrtaným otvorům (ve směru osy otvoru).

Uchopte zavaděč s pinem LeadFIX® a vložte pin do předvrtaného otvoru. Odstraňte šablonu a jemně klepněte kladívkem na konec zavaděče.

7. ODSTRANĚNÍ ZAVADĚČE



Držte zavaděč pod mírným úhlem a zpětným pohybem sejměte zavaděč ze zavedeného pinu. Pin LeadFIX® se ze zavaděče uvolní a zůstane pevně fixován v předvrtaném otvoru.