



## Tvarovatelný augmentační materiál

### Uživatelská příručka

Používejte pouze doporučené množství fyziologického roztoku

Velikost částic	Hmotnost	Množství fyziologického roztoku
<b>0,2 ~ 1,0 mm</b> (Granulát, velikost zrn)	0,15 g	💧 0,15 ml
	0,25 g	💧 0,3 ml
	0,5 g	💧 0,6 ml
	1,0 g	💧 1,2 ml
<b>1,0 ~ 2,0 mm</b> (Granulát, velikost zrn)	0,25 g	💧 0,4 ml
	0,5 g	💧 0,8 ml
	1,0 g	💧 1,6 ml
	2,0 g	💧 3,2 ml

# Upozornění

Bovinní tvarovatelný augmentační materiál SI při hydrataci doporučeným množstvím roztoku může z počátku působit jako mírně tuhý nebo suchý. Pokračujte v jeho míchání.

**Nedodržení doporučeného množství fyziologického roztoku může mít za následek nedostatečnou soudržnost materiálu a jeho stékání z kostního defektu.**

Příklad použití špatného množství roztoku



Příklad použití špatného množství roztoku



Smíchání augmentačního materiálu SI se správným množstvím fyziologického roztoku a jeho správné zpracování umožní dobrou manipulaci s materiálem, využití všech jeho unikátních vlastností a dosažení nejlepších výsledků.

MedPark a SI jsou obchodní známky společnosti MedPark Co., Ltd., Korea.